



D  tecteur de cris de b  b  

MODE D'EMPLOI

Sp  cialement con  u pour les personnes sourdes et malentendantes






Tous vos produits envoyés
ensemble sont déjà
connectés entre eux

Sommaire :

- 4** : Contenu de votre colis
- 5-10** : Détecteur de cris de bébé

Contenu de votre colis

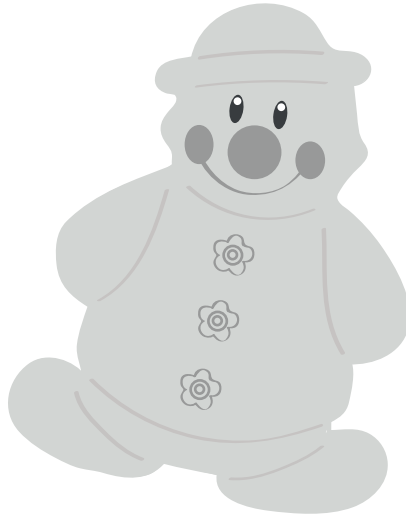


A



B

- A - Détecteur de cris de bébé
- B - Mode d'emploi en français

Détecteur de cris de bébé

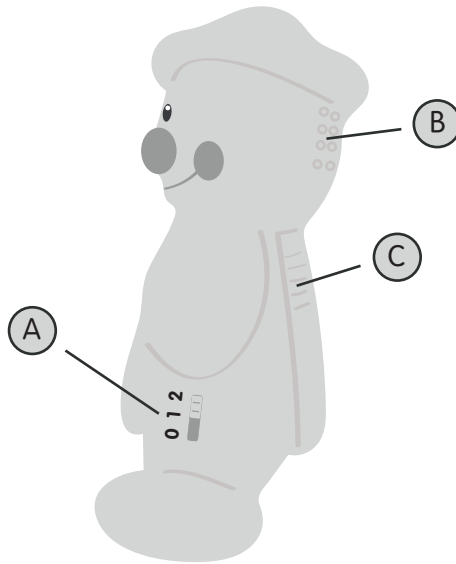

- (A) - Bouton réglages
- (B) - Capteurs audio
- (C) - Trappe piles

Caractéristiques techniques

Batterie : 2 piles LR 03 AAA (non fournies)

Dimensions (haut. x larg. x prof.) : 95 x 73 x 35 mm

Couleur : blanc motif

Poids : 64g

Fréquence d'émission : 433 Mhz

Garantie 2 ans

Caractéristiques du produit

- Appareil avec microphone intégré
- L'émetteur (le Détecteur de cris bébé) capte les pleurs de bébés et provoque une suite de signaux lumineux ou vibrants sur les récepteurs (Récepteur lumineux ou vibrants marque Jenile)
- L'émetteur cris de bébé est équipé d'un interrupteur marche/arrêt pour économiser la pile
- 2 positions pour régler la sensibilité d'écoute

Produits complémentaires

- Récepteur Lumineux fixe : la Centrale de gestion - FF8114 / Le flash secteur FP14
- Récepteur Lumineux sans fil : le Cube lumineux - CBM14
- Récepteur Vibrant : le Vibreur de poche - VP15

Réglages

Mise en marche très simple.

Mettre 2 piles AAA (non fournies) en poussant la trappe (C).


Laissez le bouton test sur la position «ON».

Position du bouton de marche (A):


- 0 : arrêt le Détecteur de cris bébé n'est pas en état de marche
- 1 : le Détecteur de cris bébé est en état de marche avec une sensibilité légère (recommandé dans le cas où le Détecteur de cris bébé est placé très proche de bébé)
- 2 : Le Détecteur de cris bébé est en état de marche avec une sensibilité très importante (recommandé dans le cas où le Détecteur de cris bébé est éloigné de bébé)

Utilisation

1) Pour synchroniser avec le Cube Lumineux :

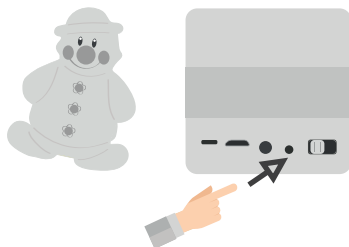


1) Mettez votre Détecteur de cris bébé en état de marche et prenez votre Cube Lumineux

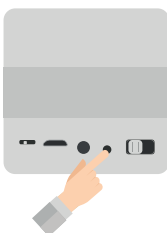

2) Appuyez sur la touche plug de votre cube




3) Dès que la lumière rouge s'allume, lâchez le plug et criez dans le Détecteur de cris bébé

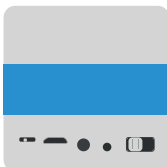

4) Le Cube Lumineux s'allume. Parfait!
Votre Détecteur de cris bébé est connecté avec votre Cube Lumineux !
Même si vous changez les piles la connexion est mémorisée

Vous pouvez désormais être tranquilles:
vous serez alerté dès que bébé sera réveillé!

2) Pour synchroniser avec le Vibreur de poche :

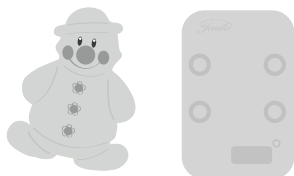


1) Mettez votre Détecteur de cris bébé en état de marche



2) Prenez votre Vibreur de poche et appuyez sur la touche plug



3) Dès que la lumière rouge s'allume, lâchez le plug et criez dans le Détecteur de cris bébé

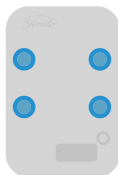


4) Le Vibreur de poche s'allume. Parfait! Votre Détecteur de cris bébé est connecté avec votre Vibreur de poche!


Vous pouvez désormais être tranquilles:
vous serez alerté dès que bébé sera réveillé!

Signaux et couleurs


Le détecteur de cris de bébé fonctionne avec l'ensemble des récepteurs de la marque Jenile.

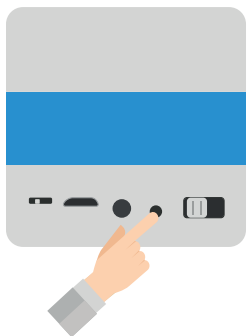

Si vous avez besoin d'être alerté du détecteur de cris de bébé, le cube et la prise secteur flash, s'illumineront en bleu

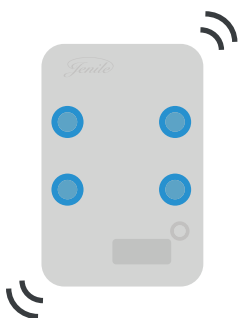

Pour le détecteur de cris de bébé, le vibreur de poche émet un rythme de une vibration avec quatre répétitions.

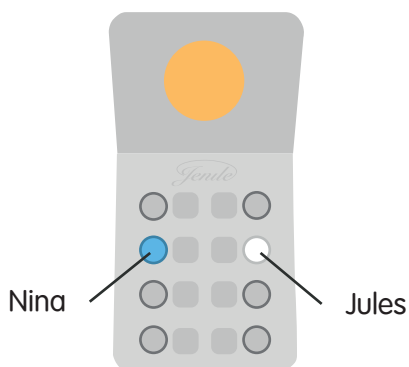

Si vous choisissez de vous équiper de plusieurs détecteurs, le flash fixe 8 diodes vous permettra de différencier ces alertes.



www.jenile.com

