




LE RÉVEIL VIBRANT RL13

Mode d'emploi

Spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes.

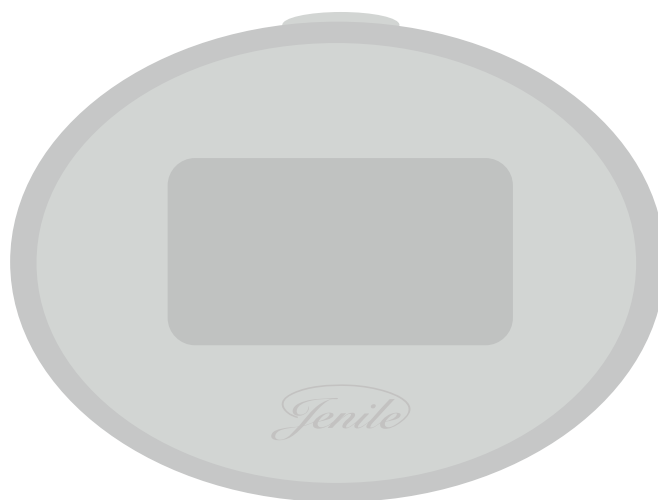




Tous vos produits sont déjà connectés entre eux.

Sommaire

- 4** : Le contenu de votre colis
- 5 - 13** : Réveil Vibrant RL13

Contenu de votre colis

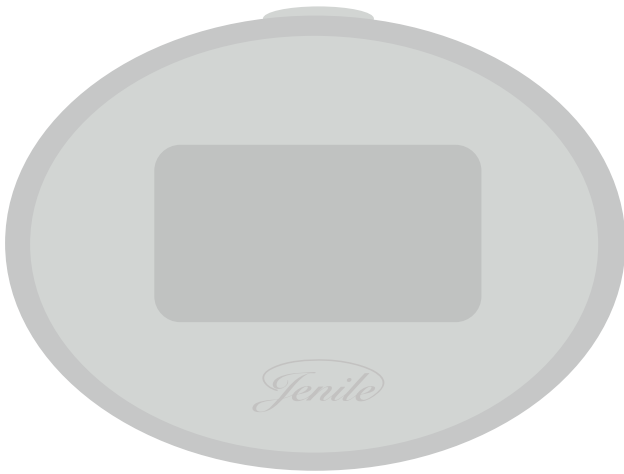


A



B

- A Le Réveil Vibrant RL13
- B Mode d'emploi français

Le Réveil Vibrant RL13

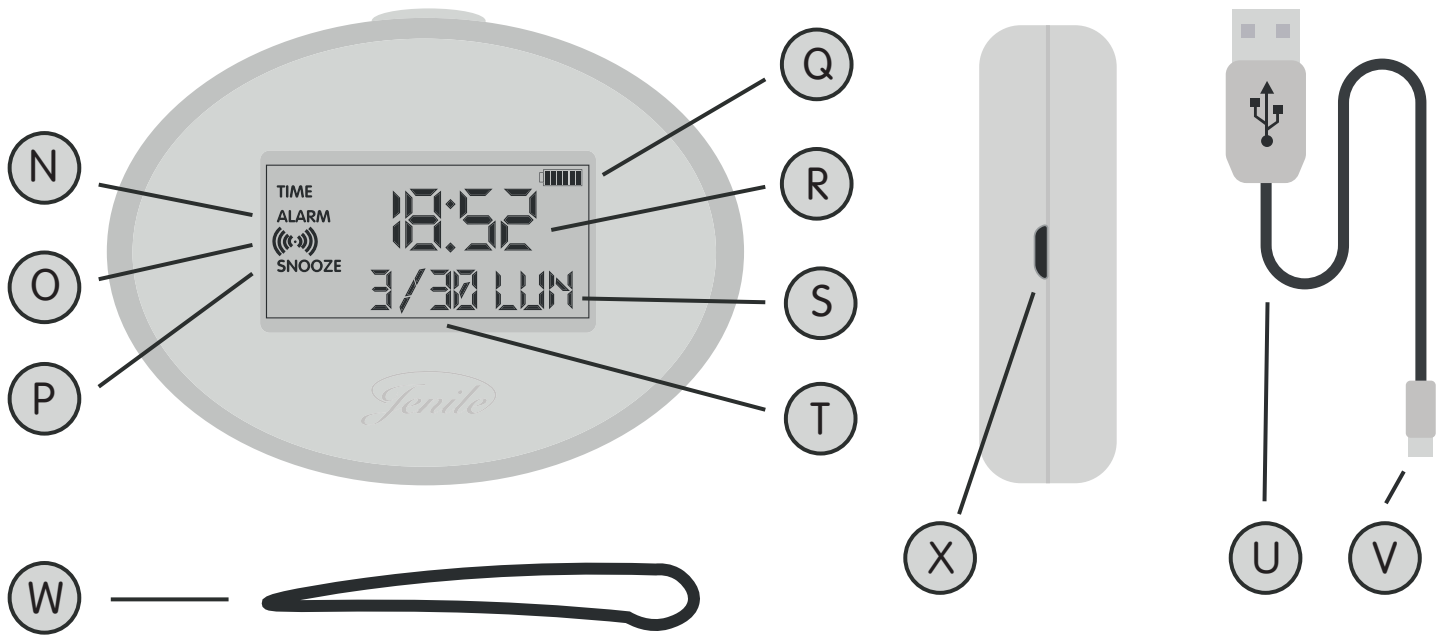

(N) Alarme réveil activée

(O) Alarme sonnette de porte activée

(P) Fonction SNOOZE activée

(Q) Niveau de batterie

(R) Heure

(S) Jour de la semaine


(T) Date

(U) Connexion port USB

(V) Connexion port Micro USB port

(W) Cordon d'attache

(X) Chargeur port Micro USB

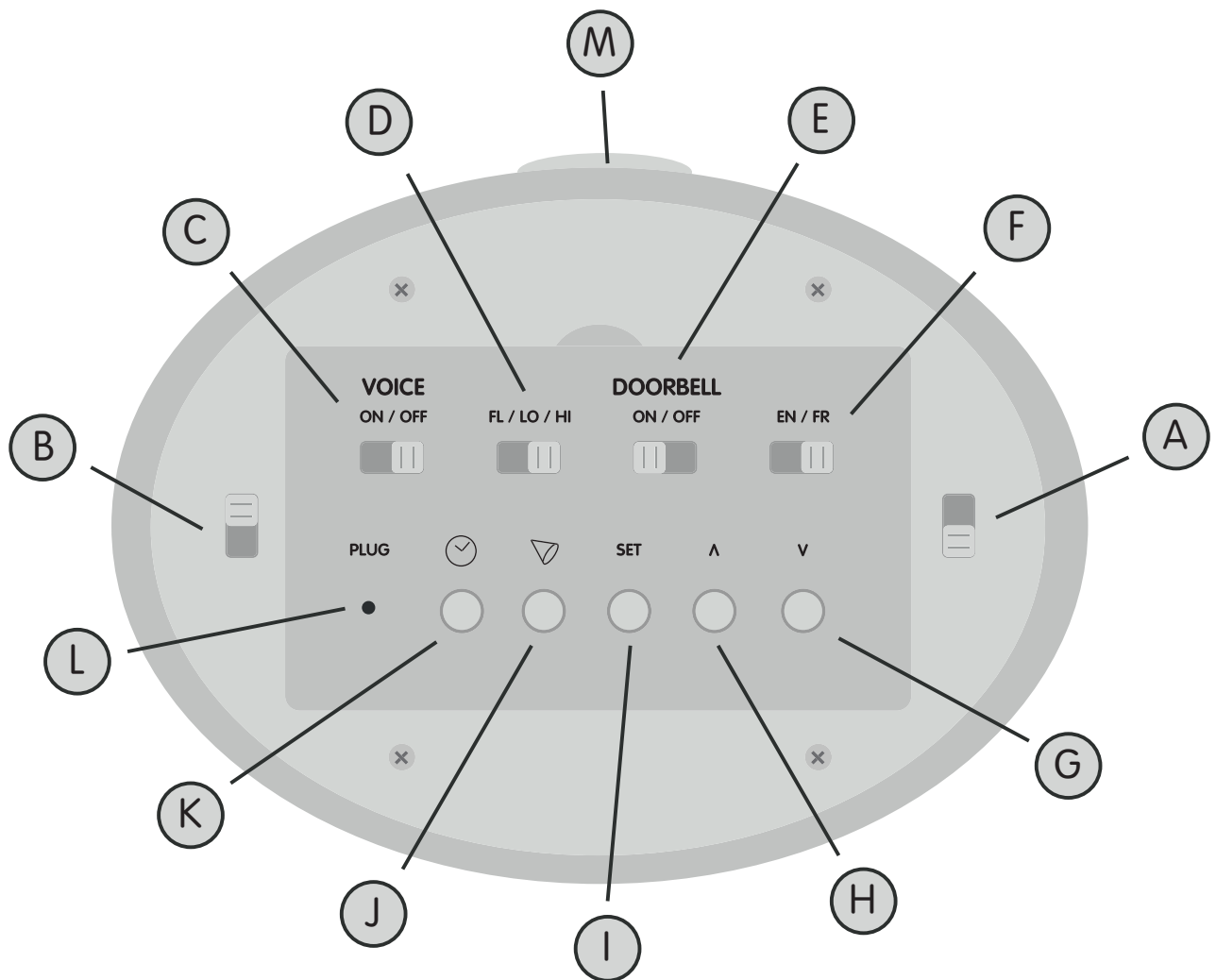

- (A) Alimentation
- (B) Bouton ON/OFF de l'alarme
- (C) Bouton ON/OFF du son de l'alarme
- (D) FL : Flash uniquement
LO : Flash + vibreur
HI : Flash + vibreur fort
- (E) BOUTON ON/OFF de l'alarme sonnette de porte
- (F) Langue (EN: english / FR: french)
- (G) Bouton changement heure/date
- (H) Bouton changement heure/date
- (I) Bouton changement de paramètres
- (J) Bouton réglage l'alarme
- (K) Bouton réglage heure
- (L) Plug Bouton
- (M) Bouton SNOOZE pour repousser l'alarme de 10 minutes.

Caractéristiques Techniques :

Installation et configuration : FACILE.

Kit de montage fourni : Oui.

Poids : 132 g.

Distance de réception des ondes radio : 150 mètres maximum en champ libre.

Fréquence Radio : 433 Mhz.

Dimensions (L x H x P) : 8,5 x 11 x 2,5 cm.

Autonomie : 2 semaines (en fonction de l'utilisation).

Sans fil : Oui.

Batterie rechargeable : Oui.

Fonctionne avec : une batterie en lithium inclus (Garantie 1 an).


Garantie : 2 ans.

Fonctionnement


Le Réveil Vibrant RL13 peut fonctionner seul ou avec la sonnette de porte Jenile. Il émet des flashes et/ou vibrations à la place de la sonnerie du réveil et/ou de la sonnette de porte.

Utilisation


Grâce au Réveil Vibrant RL13, vous recevrez un signal de la Sonnette de Porte Jenile. Le réveil de Jenile inclut une batterie rechargeable. L'image d'une batterie en haut à droite de l'écran indique son niveau de chargement :

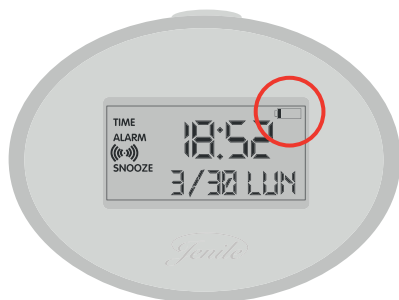


Batterie faible :
Vous devez recharger le cube.

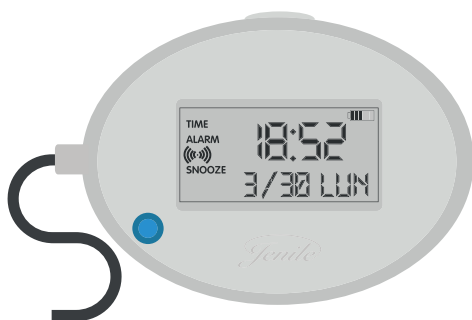


LED Bleu :
La batterie est en charge.

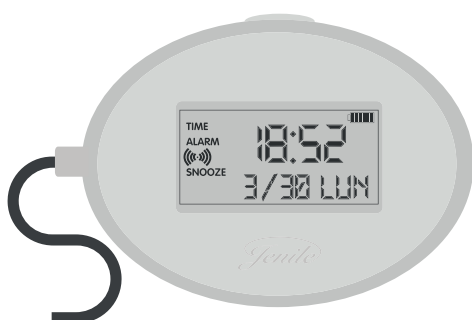


Lorsque la LED n'est pas allumé :
Le chargement est complet.

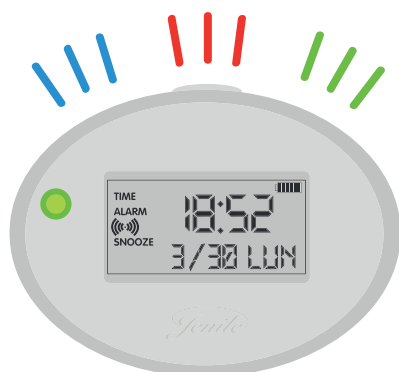


LED Vert & Flash :
Une personne sonne à la porte

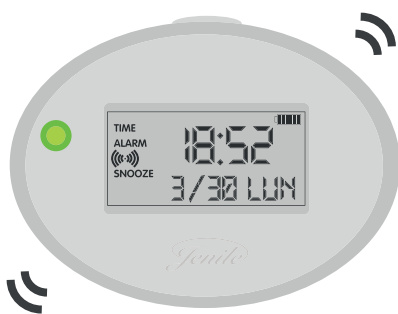


LED Vert & vibration :
Une personne sonne à la porte.

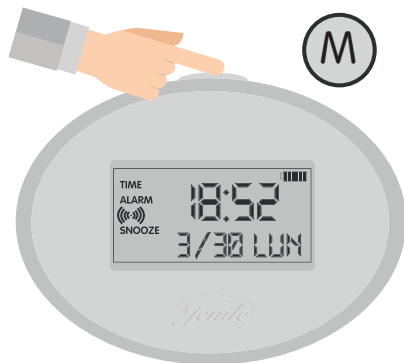

Lorsque vous voyez votre réveil se déclencher, vous devez appuyer sur le bouton SNOOZE (M) de votre alarme pour l'arrêter.

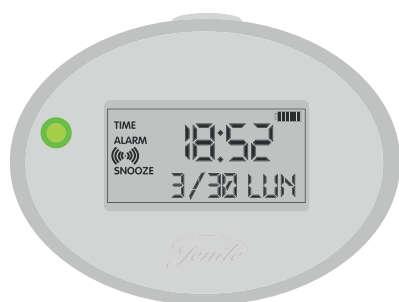


Si la LED verte clignote, cela vous prévient qu'une personne sonne à la porte. La LED verte continue à clignoter pour signaler qu'une personne a appuyé sur la sonnette de porte.

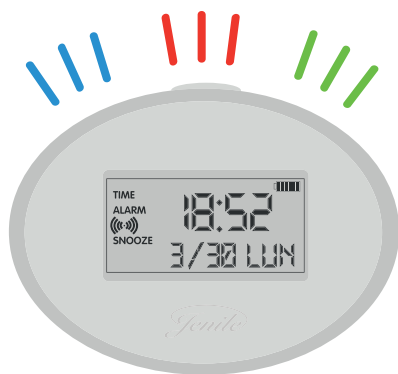

OU


Le Réveil Vibrant RL13 s'allume et/ou vibre sans la LED verte :
C'est l'heure de se lever !

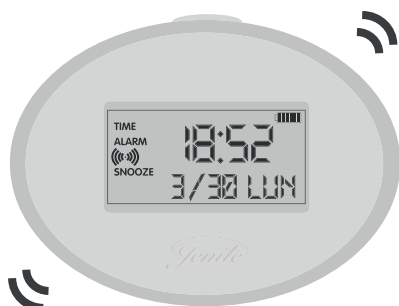


Tests

Le Réveil Vibrant RL13 est facile à tester. Si en dépit des instructions donnés ci-après, le Réveil Vibrant ne fonctionne pas, nous vous invitons à contacter votre vendeur.


Pour tester votre Réveil Vibrant RL13, allumez-le en appuyant sur le bouton ON, ensuite vérifiez que le bouton de l'alarme soit sur ON, ainsi que pour le bouton alerte de sonnette de porte.

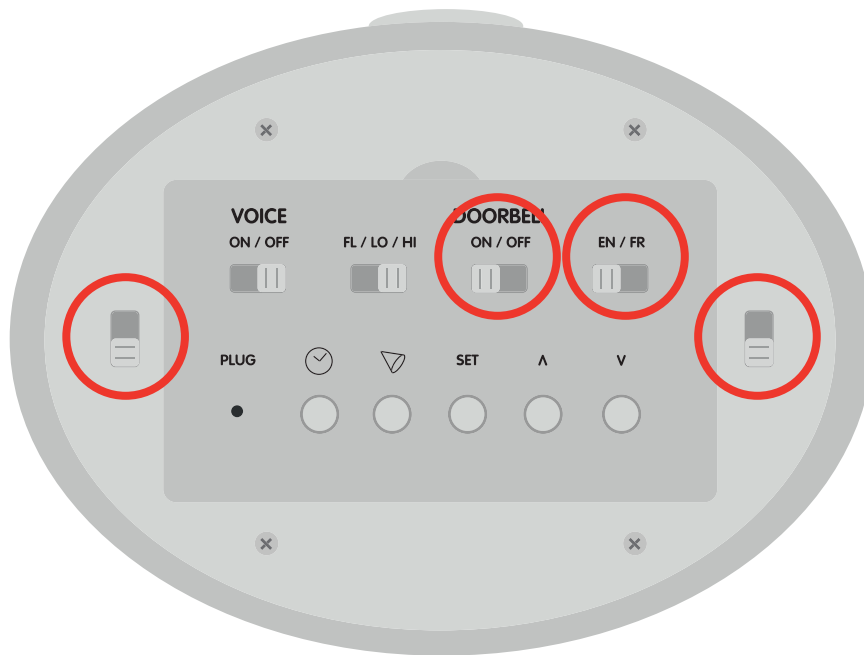

Lorsque les boutons sont bien positionnés, veuillez appuyer sur la Sonnette de Porte Jenite.

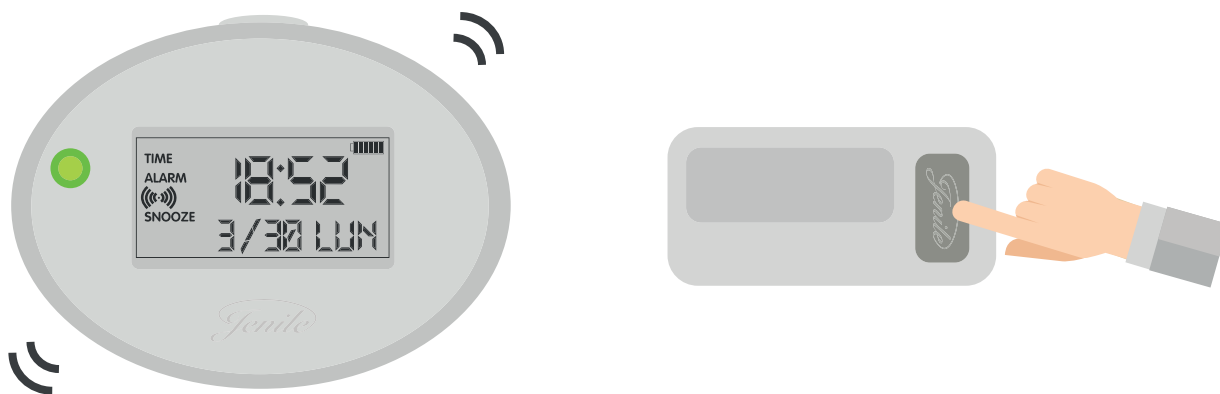

Si le Réveil Vibrant RL13 ne s'allume pas, veuillez vérifier que la batterie ne soit pas épuisée en mettant votre réveil en charge :

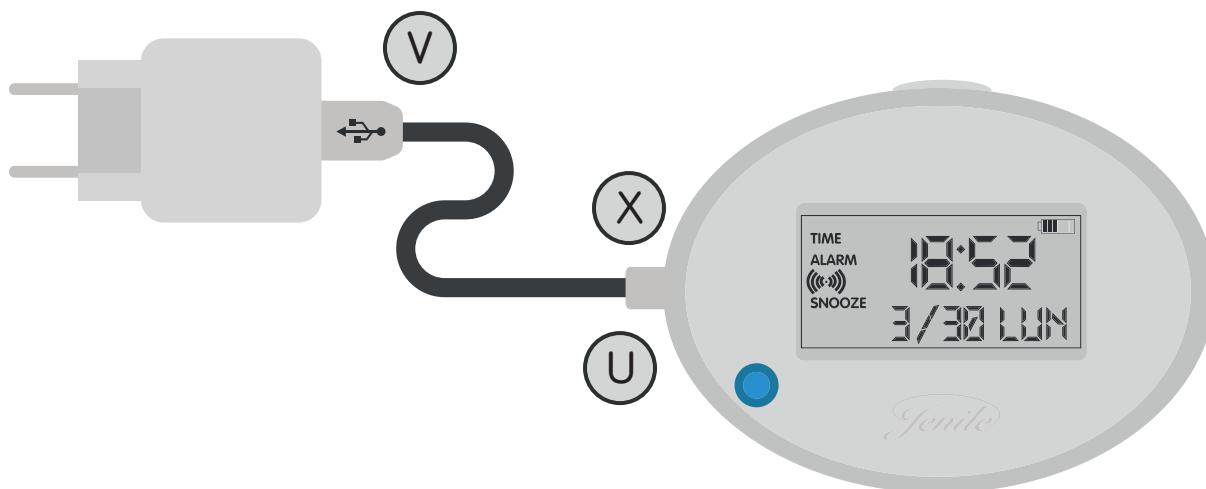

Insérer le port G de votre câble sur un port USB.
Insérer le port F de votre câble dans la prise Micro-USB (X) de votre dispositif.

Réglages



ATTENTION : Vos produits ont déjà été connectés les uns aux autres, aucune manipulation n'est nécessaire. Cependant, si vous voulez refaire les connexions, veuillez suivre les instructions suivantes.



1. Réglages de l'heure / date :

Appuyez sur le bouton (K). «Time» clignote.

Appuyer sur le bouton (I) pour paramétrer sur 24h (format heure français) ou 12h (format heure anglais).

Utilisez le bouton (G) et (H) pour changer l'heure et appuyez sur la bouton K.

Appuyez deux fois sur le bouton (I). Utilisez les touches (G) et (H) pour changer l'heure. Appuyez sur le bouton (I) pour passer aux minutes, puis la date. Utilisez toujours les touches G et H pour changer les paramètres.

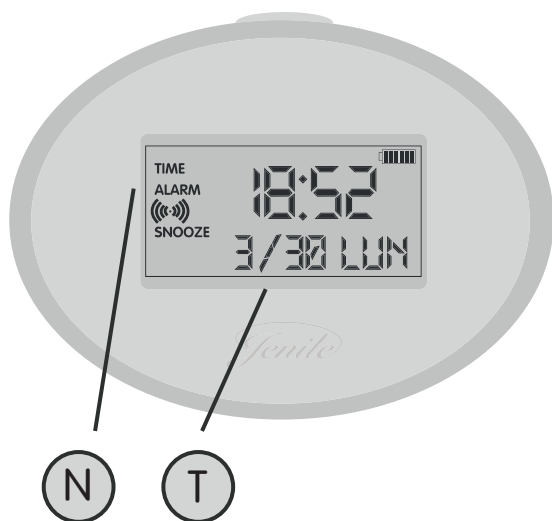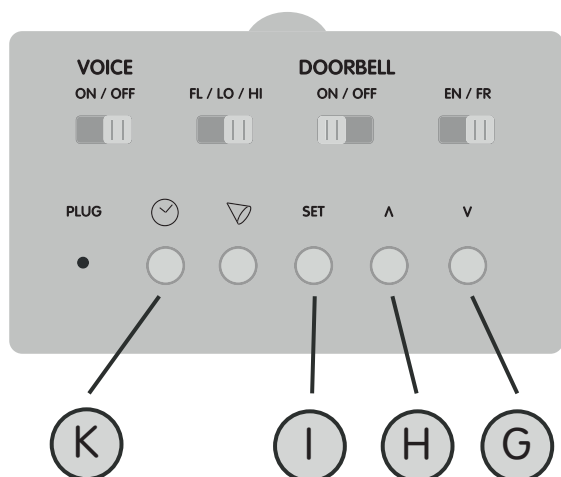

2. Réglage du réveil :


Appuyer sur le bouton (J). "Alarm" (N) clignote.

Appuyez sur le bouton (I). Utilisez les touches (G) et (H) pour changer l'heure.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 sonneries différentes.

Appuyez sur le bouton (I) pour passer à la sonnerie suivante.




Le chiffre inscrit en dessous de "MONTH" (T) indique le nombre de sonneries.

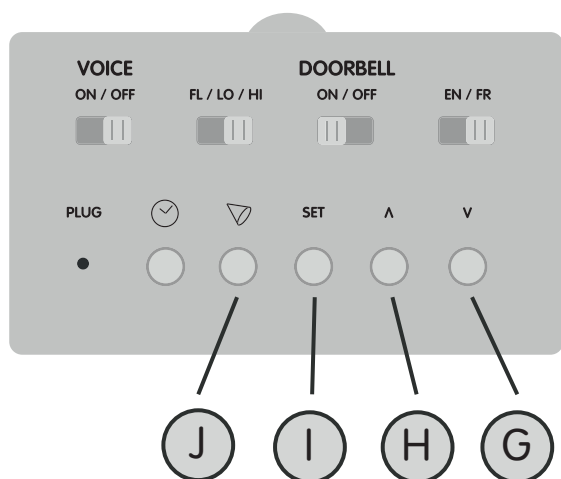

3. Pour synchroniser le réveil avec la sonnette de porte :

Pousser le bouton (E) "Doorbell" sur la position "ON".


À l'aide d'un cure-dent, appuyez sur le bouton Plug (L), une lumière rouge sur la face avant s'allumera. Appuyer immédiatement sur la sonnette de porte, le bouton rouge clignote : vous avez réussi à connecter votre réveil à la Sonnette de Porte Jenile.

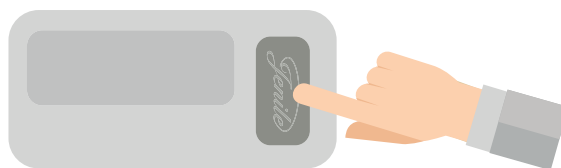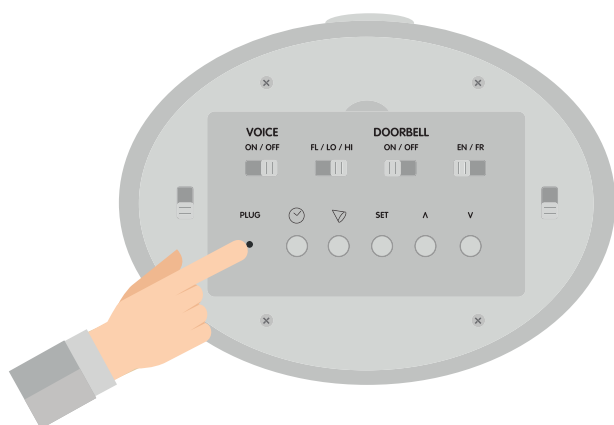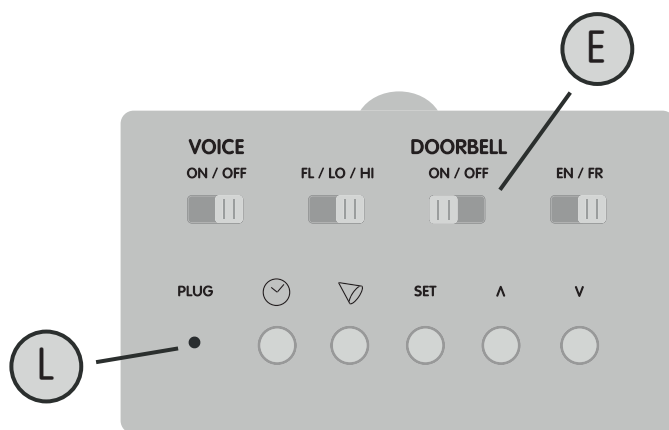

Test :

Votre alarme clignote de toutes les couleurs et une petite LED verte indique que c'est la sonnette de porte qui l'a déclenché.

- Appuyez sur "Snooze" (M) pour arrêter l'alarme. Sinon la LED verte vous indiquera en clignotant que quelqu'un à sonner jusqu'à la prochaine sonnerie.
- Appuyez sur le bouton (I) pour régler les minutes, puis la date. Utilisez toujours les boutons (G) et (H) pour changer les réglages.

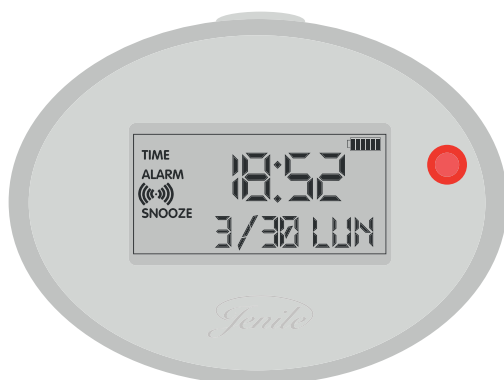



www.jenile.com



CE