



## Nous contacter


Pour toute question ou aide à l'installation, contactez notre service après-vente :

- skype : Jenile International  
du mardi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h
- mail : [contact@jenile.com](mailto:contact@jenile.com)

## Mode d'emploi


### Bouton d'appel de personnes TLC13

Spécialement conçu pour les sourds et malentendants

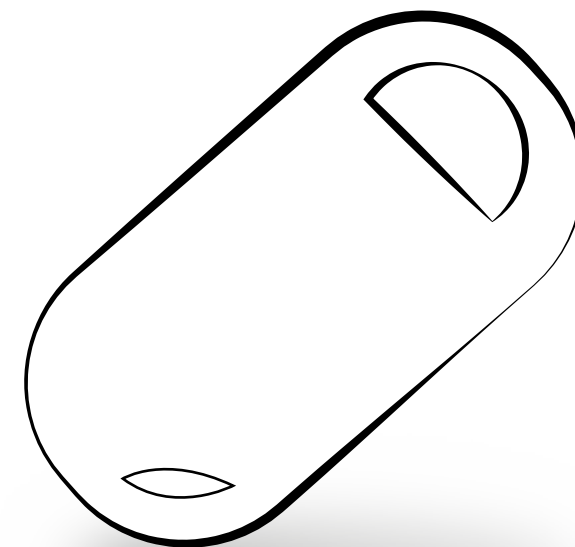

Tous les articles qui vous ont été envoyés ensemble sont déjà connectés les uns aux autres.

## Contenu de votre colis

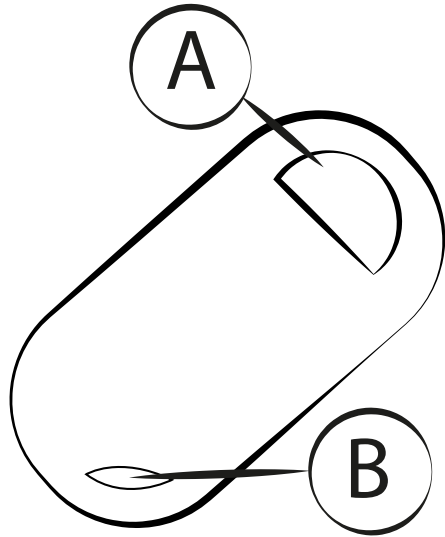

- A:** Bouton  
**B:** Accroche pour porte clés

## Caractéristiques techniques

- **Dimensions (haut. x larg.) :** 55x30 mm
- **Couleur :** noir
- **Poids :** 19g
- **Alimentation électrique :** Pile 12V inclus
- **Autonomie :** 2 ans
- **Fréquence d'émission :** 433,33 Mhz
- **Distance de réception des ondes radio :** 50 m champs libre

Le bouton d'appel est spécialement conçu pour envoyer un signal aux récepteurs flashes et vibrants Jenile et appeler la personne sourde ou malentendante se trouvant dans une autre pièce.

## Principe de fonctionnement

Un système de signalisation se compose d'au moins un émetteur et d'un récepteur. Lorsqu'une personne appuie sur le bouton d'appel, le signal est converti en impulsions radio. Ces impulsions radio (433 MHz) sont transmises sans fil aux récepteurs flashes ou vibrants Jenile. Les récepteurs Jenile s'allument/vibrent alors en vert.

## Réglages

La connexion entre les produits est déjà réalisée si vous avez reçu vos récepteurs en même temps que votre émetteur de sonnette. Sinon, la connexion est très simple :

- 1.** Appuyez sur la touche plug du cube ou du vibreur et relâcher la touche dès que le récepteur s'allume en rouge (ATTENTION: ne pas rester appuyé après que la couleur se soit allumée, vous risquez d'effacer toutes les précédentes connexions)
- 2.** Appuyez immédiatement sur le bouton d'appel, pendant que la lumière rouge est allumée

## Maintenance et entretien

Le bouton d'appel longue distance Jenile est exempt de maintenance. S'il est sale, nettoyez les surfaces du produit à l'aide d'un chiffon doux sans peluches. N'utilisez jamais d'agents nettoyant ou de solvants.

## Garantie

Tous les appareils Jenile sont garantis. Si en dépit d'un montage et d'un emploi correct, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez contacter notre service après-vente, disponible en Visio sur Skype (jenile-international). La garantie comprend la réparation gratuite (y compris la réexpédition). Vos récepteurs ne s'enclenchent pas ? Peut-être s'agit-il d'un simple réglage à réaliser.

**ATTENTION :** Vous devez impérativement contacter notre service après-vente avant la réexpédition de votre appareil. Nous ne prendrons pas en charge les frais de réexpéditions en cas de bon fonctionnement. Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).