




Mode d'emploi

Coussin vibrant CoV14
Spécialement conçu pour les sourds et
malentendants

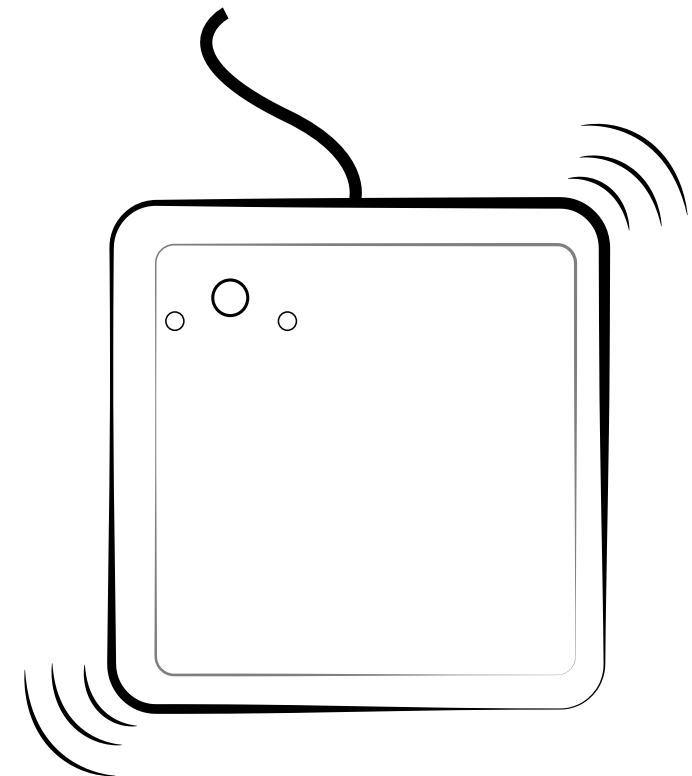

Nous contacter


Pour toute question ou aide à
l'installation, contactez notre service
après-vente :

- skype : Jenile International
du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
- mail : contact@jenile.com



Tous les articles qui vous ont
été envoyés ensemble sont déjà
connectés les uns aux autres.

Contenu de votre colis

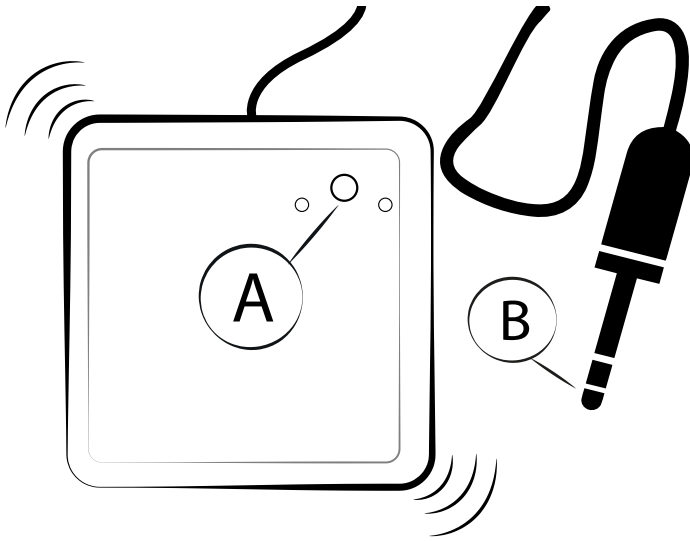

A: Bouton test

B: Prise jack

Caractéristiques techniques

Facile et simple d'installation

Dimensions (haut. x larg. x prof.) :

Coloris : Bleu / vert / violet / noir

Alimentation électrique : piles AAA (non fournies)

Câble de raccordement : 1m50 prise jack

Garantie 2 ans

Principe de fonctionnement

Un système de signalisation se compose d'au moins un émetteur et d'un récepteur. Les émetteurs Jenile émettent un signal radio sans fil (433 MHz) aux récepteurs flashes ou vibrants Jenile.

Le coussin vibrant, permet d'être alerté pendant son sommeil des urgences et de tout ce qui peut se passer dans la maison. Lorsque le cube CBM14 s'allume, il transmet un signal au coussin qui s'enclenchera à son tour alors en vibration. En vous réveillant vous pourrez voir, grâce au cube, la provenance de l'alerte (rouge : urgences, vert : sonnettes, bleu : les appels, neutre : présence d'un individu)

Réglages

La connexion entre les émetteurs Jenile se fait par le cube, si vous ne recevez pas le signal vibrant sur le coussin, contactez notre service après-vente.

Maintenance et entretien

Le coussin vibrant Jenile est exempt de maintenance. S'il est sale, nettoyez les surfaces du produit à l'aide d'un chiffon doux sans peluches.

N'utilisez jamais d'agents nettoyants ou de solvants.

Test

Après avoir branché votre coussin au cube, le coussin s'enclenchera à chaque fois que le cube recevra un signal des émetteurs de la maison. Si vous souhaitez ne pas être alerté de certains émetteurs Jenile, il vous suffit pour cela de déconnecter l'émetteur non désiré sur le cube. Pour cela, référez vous directement au mode d'emploi de votre cube.

Si vous constatez que le coussin ne vibre pas alors que votre cube s'est enclenché, appuyez sur la touche test de votre coussin, si il ne vibre toujours pas, c'est que vos piles sont épuisés. Si vous constatez que le Cube CBM14 ne s'allume pas, c'est que la connexion entre l'émetteur et le récepteur a été perdue. Pour la réactiver référez vous au mode d'emploi du cube.

Garantie

Tous les appareils Jenile sont garantis. Si en dépit d'un montage et d'un emploi correct, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez contacter notre service après-vente, aussi disponible en Visio sur Skype.

La garantie comprend la réparation gratuite (y compris la réexpédition).

Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).