




Vibreux de poche VP15

MODE D'EMPLOI

Spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes

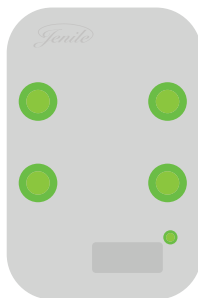



Tous vos produits sont déjà
connectés entre eux


Sommaire :

- 4** : Contenu de votre colis
- 5-11** : Vibreur de poche VP15

Contenu de votre colis



(A)

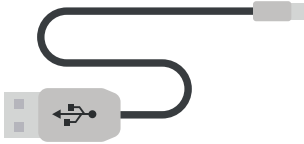


(B)



(C)

- (A) - Vibreur de poche
- (B) - Câbles USB
- (C) - Mode d'emploi français

Vibreur de poche VP15

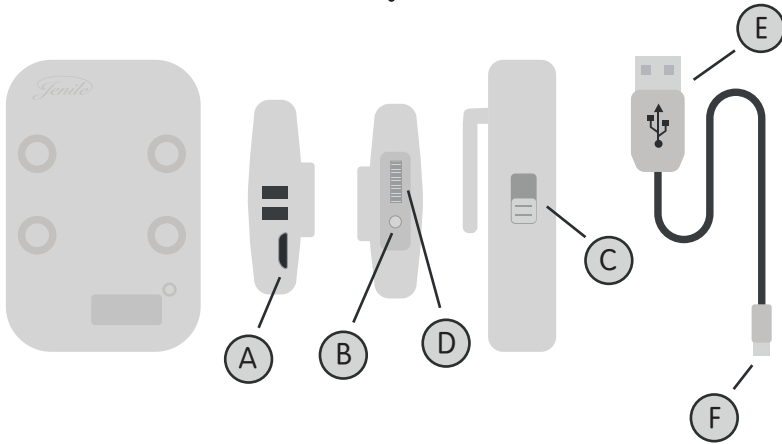

- (A) - Port chargeur micro USB
- (B) - Plug de connexion
- (C) - On / Off
- (D) - Variateur de puissance de vibration
- (E) - Port de connexion Micro USB
- (F) - Port de connexion USB

Caractéristiques techniques

Dispositif sans fil

Batterie rechargeable

Poids du vibreur : 60g

Distance entre les émetteurs et le vibreur : 200 m maximum en champs libre

Quantité de produits connectés : maximum 20 unités.

Alimentation : batterie 3.7V 2200mAh Lithium, la tension de charge est limité 4.2V

Courant de veille : < 4,5 mA

Courant de fonctionnement : < 800 mA

Fréquence Radio : 433 Mhz

Format de décodage : MCU


Dimensions vibreur: L x H x P : 6 x 8 x 1,3 cm

Autonomie : 1 mois (en fonction de l'utilisation)


Garantie 2 ans (batterie 1 an)

Utilisation


Grâce à votre vibreur de poche VP15 vous recevez la sonnette de porte Jenile et également tous les autres appels et les signaux de sécurité domotique. 4 rythmes de vibration et 3 couleurs indiquent les sources d'appels ou alertes.

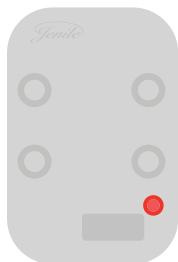

LED rouge : la batterie est faible,
il faut recharger le vibreur

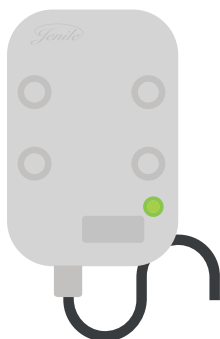

LED verte : la batterie est en charge

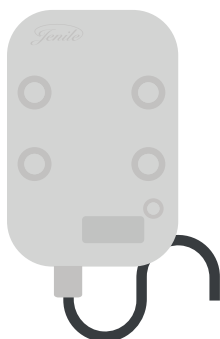

Aucune LED allumée:
la charge de votre vibreur est complète.


Attention, il est possible que aucune LED ne soit allumée parce que la batterie a été complètement vidée. Il faut le mettre à charger.

Tests

Le vibreur de poche Jenile VP15 est facile à tester. Si le vibreur de poche ne fonctionne pas conformément aux instructions ci-dessous, nous vous invitons à contacter votre vendeur. Pour le tester, veuillez appuyer sur la sonnette de porte Jenile.




Si le vibreur s'allume mais ne vibre pas merci de vérifier votre variateur (D), il est sûrement réglé au minimum.

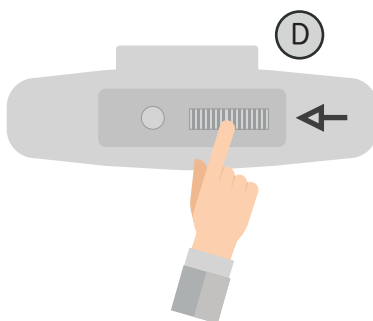


Si la LED verte en bas à droite de votre appareil ne s'allume pas, cela veut dire qu'il est probablement entièrement déchargé.

Réglages


Si vous souhaitez compléter ce pack avec d'autres émetteurs Jenile (voir émetteurs page 16) vous devrez alors faire les réglages pour connecter vos produits entre eux. Pour connecter tous vos produits suivez attentivement les instructions.

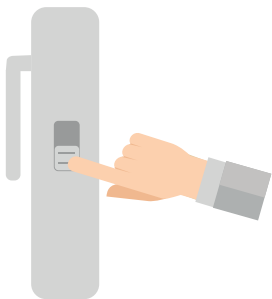

1. Allumez votre vibreur en le mettant en position ON.

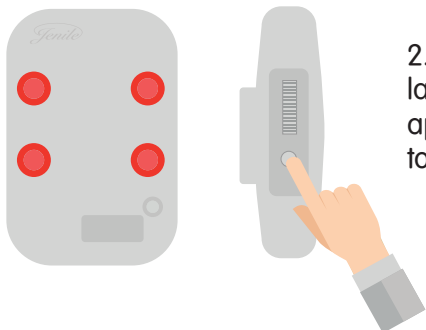


2. Appuyez très rapidement une seule fois sur la touche plug du vibreur (ATTENTION ne pas appuyer trop longtemps vous risquez d'effacer toutes les précédentes connexions)

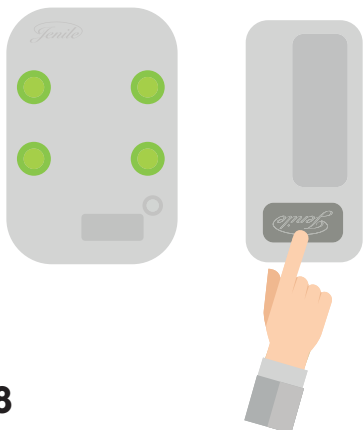


3. actionnez le transmetteur immédiatement après avoir appuyé sur le plug (appuyez sur la sonnette de porte, la télécommande, criez dans le détecteur de cris bébé, ...)


3 possibilités :

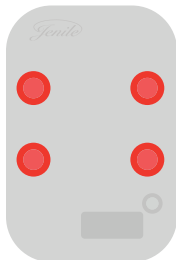

1. Le LED rouge clignote 2 fois mais il ne vibre pas. La connexion a échoué, il n'a pas reçu le signal du transmetteur.

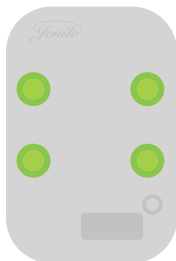


2. Le vibreur clignote d'une couleur (vert, bleu ou rouge selon l'alerte) et vibre. En haut à gauche le LED rouge clignote deux fois. La connexion est réussie.

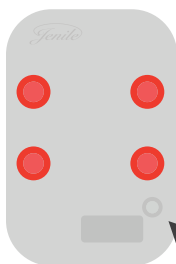

3 times


3. Le LED rouge clignote 3 fois, il ne vibre pas. La connexion a échoué car vous avez appuyez trop longtemps avec votre cure dent sur le plug. Vous avez effacé la mémoire et devez recommencer toutes les connexions.

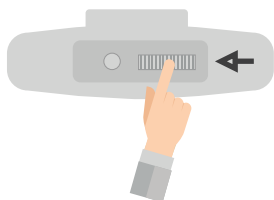

4. Choisissez le niveau de vibration sur le haut du vibreur qui vous convient.


Signal et couleurs

Le vibreur de poche VP15 JENILE peut être utilisé avec tous les émetteurs de la gamme JENILE. Pour toutes les alertes, le vibreur de poche vibrera et s'illuminera en même temps. La couleur de la lumière ainsi que le rythme de vibration vous indiquera le type d'alerte. Pour la sonnette de porte le vibreur s'allumera en vert avec 2 vibrations répétées 5 fois de suite. (plus de couleurs p. ...)

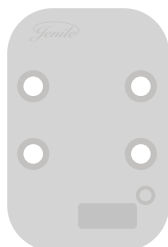


BLANC et vibrations très rapides: (4x4 répétitions) les alertes de présence.

- Détecteur d'ouverture de portes / fenêtres
- Détecteur de mouvements / de présence

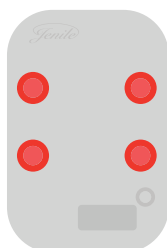


ROUGE et vibrations rapides: (x3 avec 4 répétitions) Les urgences

- détecteur de fumée
- détecteur de gaz, etc ...

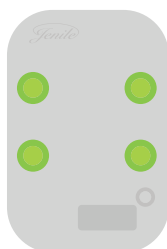


VERT et vibrations moyennes: (x2 avec 4 répétitions) Les sonnettes

- Sonnette
- Visio-porte
- Vidéo-portail
- Émetteur acoustique
- Bouton d'appels de personne, etc ...

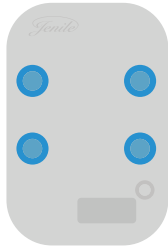

BLEU et vibrations lentes:
(x1 avec 4 répétitions) Les appels

- SMS Flasher
- téléphone, fax
- appels PC (Skype, OOVOO...), etc ...

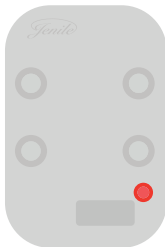

SANS COULEUR et vibrations très lentes (x1 vibration toutes les 20 secondes) alerte batterie faible



www.jenile.com



CE