


LE REVEIL VIBRANT RL19

MODE D'EMPLOI

Spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes

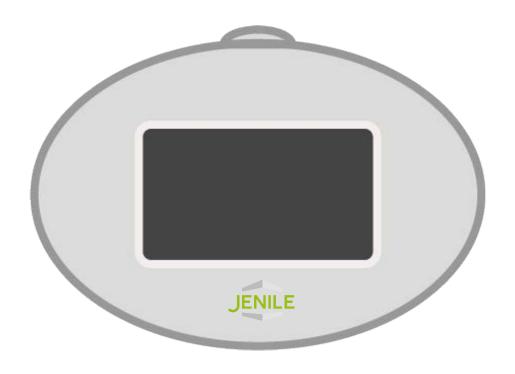






Tous vos produits sont déjà connectés entre eux

Sommaire

4 : Contenu de votre pack


5 - 13: Réveil vibrant RL19

Contenu de votre pack

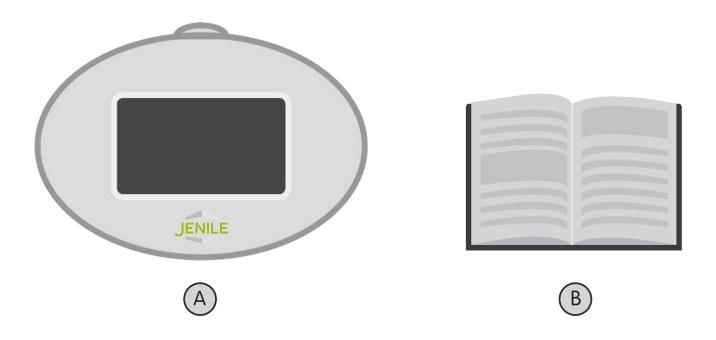


- A Réveil lumineux RL19
- B Mode d'emploi

Réveil lumineux et vibrant

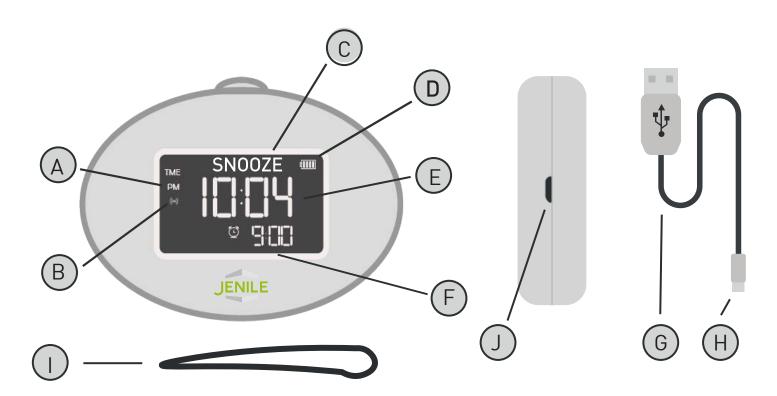

- A L'heure sur le format de 12h
- B Alarme activée
- C Mode "SN00ZE" activé
- D Niveau de batterie
- E Heure
- F Heure de l'alarme

- G Connexion Port USB
- (H) Connexion port micro-usb
- (I) Cordon d'attache
- (J) Chargeur port Micro-USB

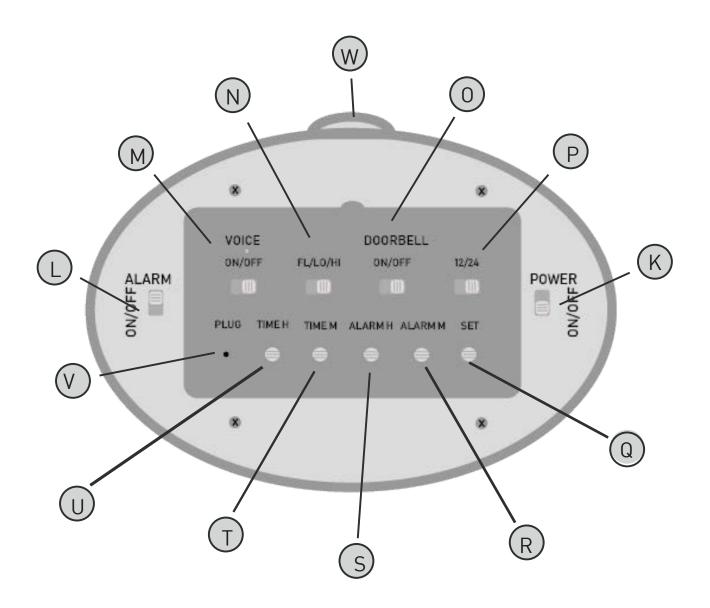

- (K) Alimentation
- Bouton ON/OFF de l'alarme
- M) Bouton ON/OFF du son de l'alarme
- N FL : Flash uniquement LO: Flash + vibreur

HI: Flash + Vibreur fort

- Bouton ON/OFF de l'alarme sonnette de porte
- P 12 : Format de l'heure sur 12h 24 : Format de l'heure sur 24h

- Q Bouton de réglage de l'heure et alarme
- Réglage des minutes de l'alarme
- S Réglage des heures de l'alarme
- T Réglage des minutes de l'heure
- (U) Réglage des heures de l'heure
- V Bouton de connexion
- W Bouton SNOOZE pour repousser l'alarme de 10 min

Caractéristiques techniques

Sans fil Batterie rechargeable Fonctionne avec une batterie en lithium (inclus)

Poids: 130g

Portée: 150 mètre en champs libre

Fréquence radio: 433 Mhz

Dimensions (taille x largeur x profondeur): 8,5 x 11 x 2,5 cm

Autonomie: 2 semaines (en fonction de l'utilisation)

Garantie 2 ans (batterie 1 an)

Fonctionnement

Le réveil vibrant peut fonctionner seul ou avec la sonnette de porte Jenile. Il émet des flashs et/ou vibrations à la place de la sonnerie du réveil et/ou de la sonnette de porte.

Rechargement

Grâce au réveil, vous recevrez un signal de la sonnette de porte Jenile. Le réveil de Jenile inclut une batterie rechargeable. L'image d'une batterie en haut à droite de l'écran indique son niveau de chargement :



Batterie faible : vous devez recharger le réveil



LED bleue : la batterie est en charge



Lorsque la LED n'est pas allumé : le chargement est complet

Utilisation avec une sonnette Jenile



Si N est sur FL, vous aurez : une LED vert et le réveil s'illumine, lorsque qu'une personne sonne à la porte.



Si N est sur L0 ou HI, vous aurez: une LED verte et des vibrations, lorsque qu'une personne sonne à la porte.



Si la LED verte s'illumine, le réveil vous prévient que quelqu'un a sonné à la porte.

Utilisation de la fonction réveil



OU



Lorsque vous utilisez la fonction Alarme, le réveil s'illumine ou vibre sans la LED verte : C'est l'heure de se lever !




Lorsque vous voyez votre réveil se déclencher, vous devez appuyer sur le bouton SN00ZE de votre réveil pour l'arrêter.


Tests

Le réveil est facile à tester. Si, malgré les instructions, le réveil ne fonctionne pas, nous vous invitons à contacter votre vendeur.


Pour tester votre réveil vibrant, allumez-le en appuyant sur le bouton ON ensuite vérifiez que le bouton et le bouton os soient sur ON également.

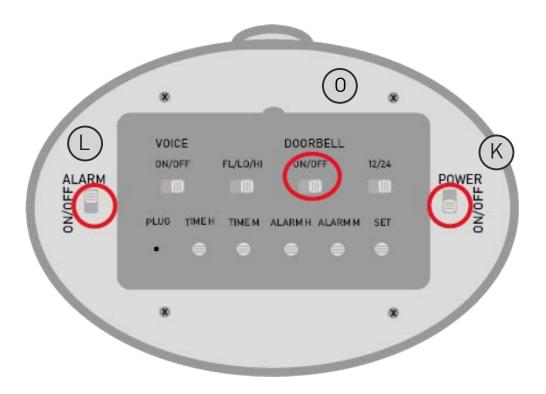

Lorsque les boutons sont bien positionnés, veuillez appuyer sur la sonnette de porte Jenile.

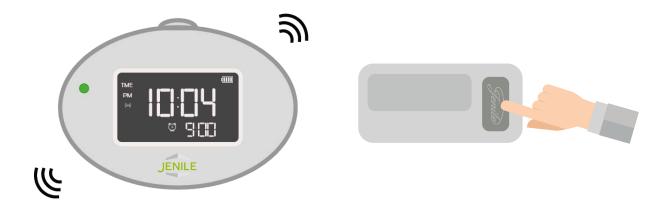

Si le réveil ne s'allume pas, veuillez vérifier que la batterie ne soit pas épuisé en mettant votre réveil en charge :

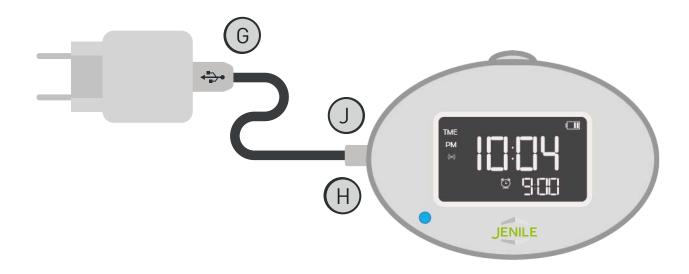


Insérer le port G de votre câble sur un port USB.


Insérer le port H de votre câble dans la prise (J) de votre appareil.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, nous vous invitons à vérifier la connexion entre la sonnette de porte et le réveil lumineux vibrant.

Réglages

Attention : Vos produits ont déjà été connectés les uns aux autres, aucune manipulation n'est nécessaire. Cependant, si vous voulez refaire les connections, veuillez suivre les instructions suivantes.

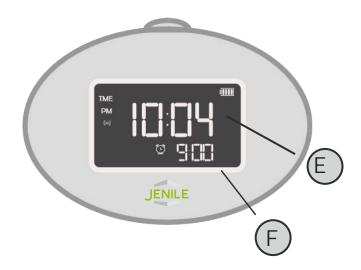

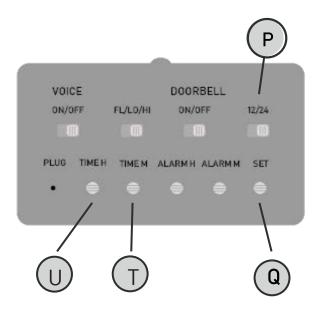

1. Réglage de l'heure


Déplacez le bouton (P) sur 24 pour un format de l'heure sur 24h (France) ou sur 12 pour un format sur 12h (Angleterre).

Appuyez sur le bouton (Q),



clignote.

Utilisez (U) et (T) pour changer l'heure et les minutes et appuyez sur (Q) pour valider.

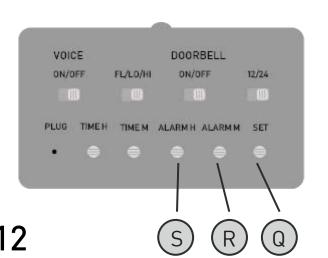


2. Réglage de l'alarme

Appuyez sur (Q).



Utilisez (S) et (R) pour changer l'heure et les minutes et appuyez sur (Q) pour valider.

3. Pour synchronisez le réveil avec la sonnete de porte :

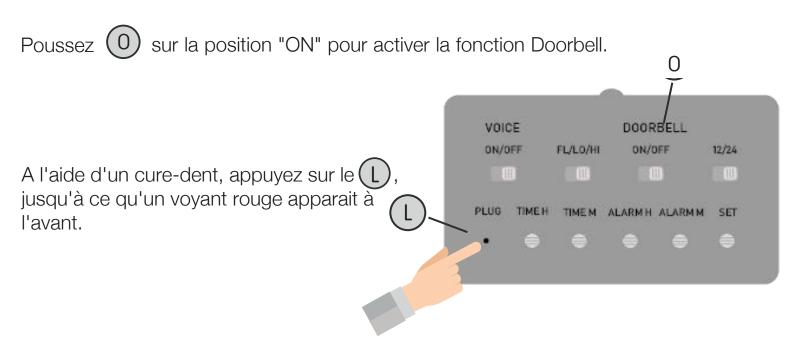


Relachez tout de suite le cure-dent et appuyez sur la sonnette de porte Jenile.



Si votre réveil vibre ou s'illumine, vous avez réussi à connecter votre réveil à la sonnette de porte Jenile.



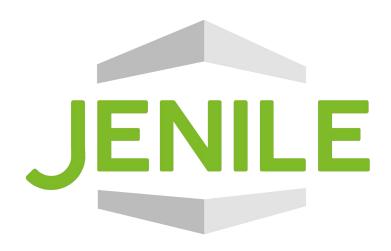

www.jenile.com



