



# Mobilā telefona zvana detektors MF17

## Lietošanas instrukcija

Īpaši paredzēts nedzirdīgiem un vādzirdīgiem





Visi **Jenile** produkti ir saderīgi.

# Kopsavilkums:

- 4 :** Iepakojuma komplekts
- 5-10 :** Mobilā telefona zvana detektors MF17

# Iepakojuma komplekts



(A)



(B)




(C)



(D)

- (A) Mobilā telefona zvana detektors MF15
- (B) Audio kabelis
- (C) USB kabelis
- (D) Lietotāja instrukcija

# Mobilā telefona zvana detektors MF17

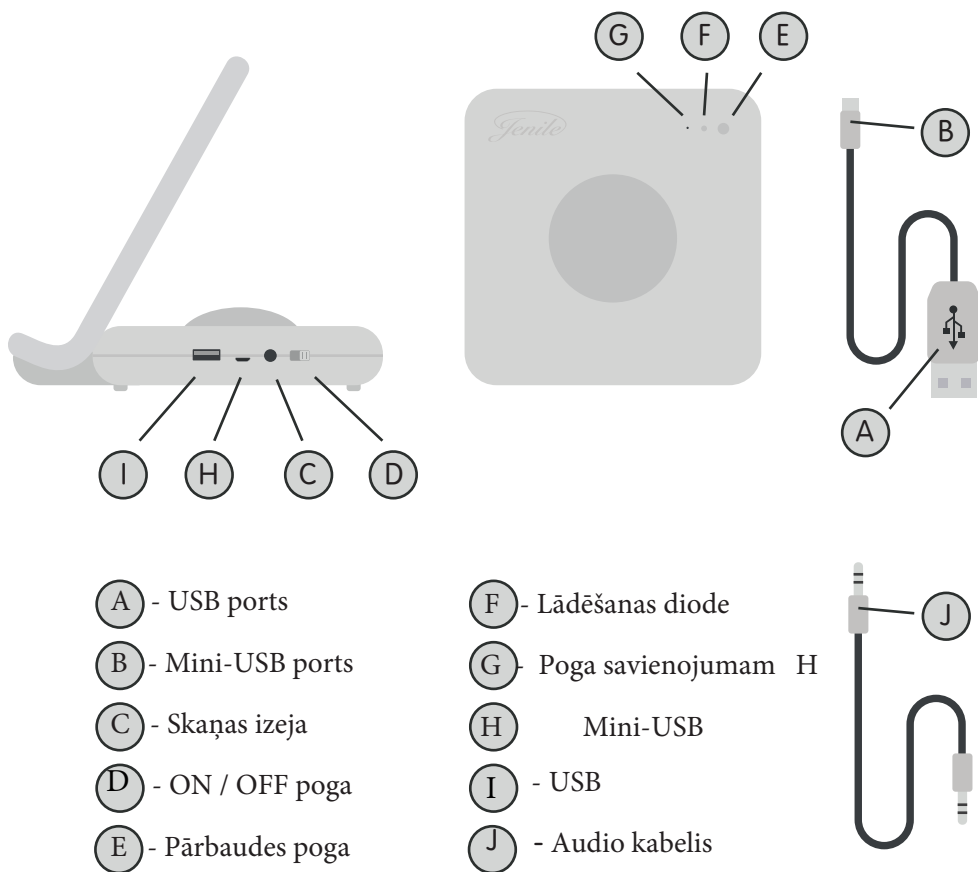

(A) - USB ports

(B) - Mini-USB ports

(C) - Skaņas izeja

(D) - ON / OFF poga

(E) - Pārbaudes poga

(F) - Lādēšanas diode

(G) - Poga savienojumam H

(H) Mini-USB

(I) - USB

(J) - Audio kabelis

## Tehniskais raksturojums

### Bezvadu ierīce

**Darbības laiks** no vienas uzlādes: 2 nedēļas - 1 mēnesis

**Uzlādējams akumulators:** Mikro USB un ingrēta 3000Mah

**Bezvadu pārraides attālums:** 100 m

**Izmēri:** 125x113x100 mm

**Svars:** 219g


**Krāsa:** balta

**Pārraides frekvence:** 433 Mhz


**2 gadu garantija**

## Izmantošana


Pateicoties mobilā telefona zvana detektoram MF17, jums tiks paziņots par visiem zvaniem vai ziņojām. Nemet vērā, ka jūsu detektoram MF17 nevar automātiski savienot ar Jenile uztvērējiem (uztvērējs ar gaismas indikatoriem, kabatas vibrators vai gaismas diožu indikators ar skaņas signālu). Detektoram ir aprīkots ar uzlādējamu akumulatoru.

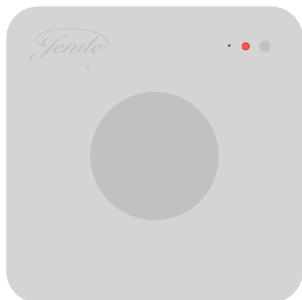


Gaismas diode (F) iedegas sarkanā krāsā, lai brīdinātu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems,

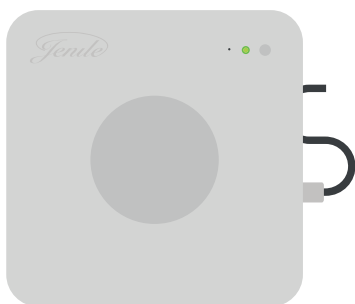


zaļā krāsā, kad akumulators tiek uzlādēts. Kad gaismas diode (F) nedeg, ierīce strādā normāli normāli.

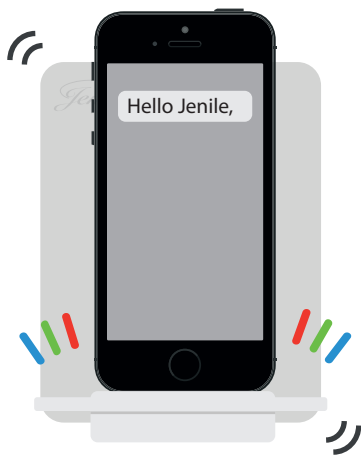

Kad saņemat zvanu vai ziņojumu, detektors 1 minūti iedegsies ar daudzkrāsainām gaismām.

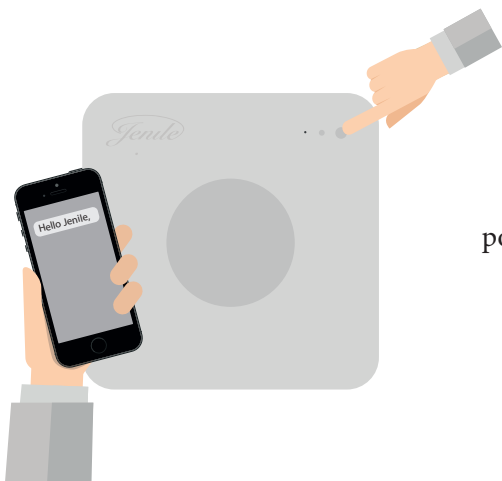

Lai to izslēgtu, vienkārši nospiediet pogu (E). Tas ļauj paziņot īsziņu sūtītājam, ka esat redzējis ziņojumu.

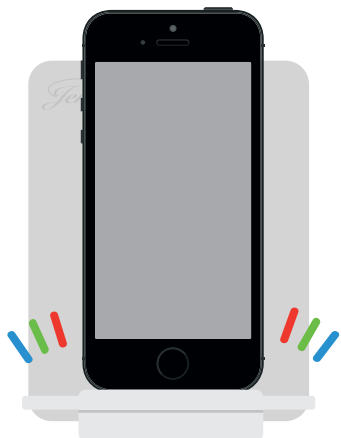


Ja nospiežat pogu, turpinās daudzkrāsainas gaismas mirgojot ik pēc 10 sekundēm, lai informētu jūs par zvana vai ziņas saņemšanu




Nospiediet pogu (E), lai apturētu gaismas mirgošanu un ziņojat detektoram, ka esat redzējis ziņojumu.

## Iestatījumi


Ja esat saņēmis mobilā telefona zvana detektoru, tas nav savienots ar citiem Jenile ierīcēm, kas jums jau pieder. Tāpēc, lai tie darbotos pareizi, jums jāsavieno visas ierīces. Lai to izdarītu, uzmanīgi izpildiet norādījumus un ierīču instrukcijas.

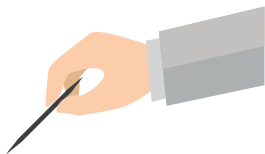

Paņemiet tievu un asu priekšmetu, piemērām adatu

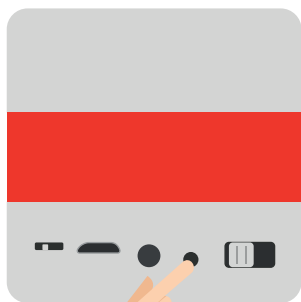


Nospiediet uztvērēja pieslēgšanās/restarta pogu (kabatas vibrators utt.), Līdz iedegās sarkanā krāsā indikators


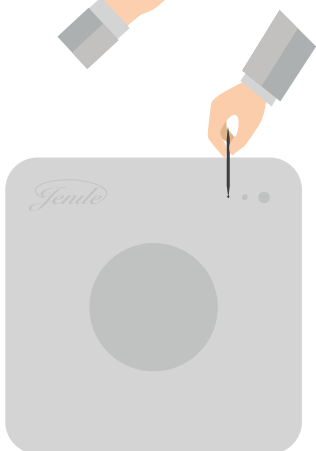


Nekavējoties un ātri nospiediet detektora pogu (G) ar piemērām adatu.



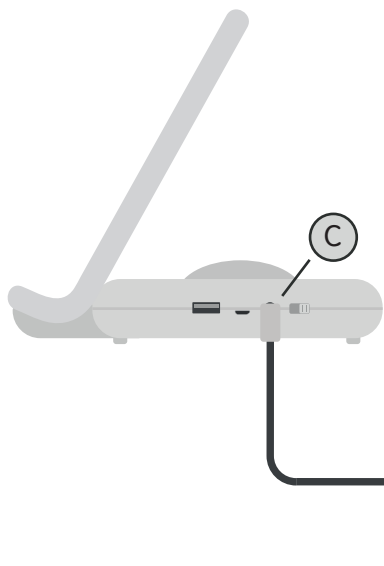

Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots telefona audio izejai(J) un detektora audio ieejai(C)

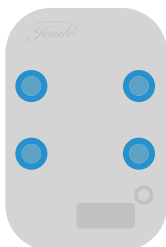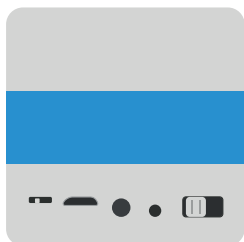

Kad iedegas indikators tel. zvana detektorā, uztvērējs ar gaismas indikatoriem vienlaikus vajadzētu iedegties zilā krāsā. Ja nē, atkārtojiet darbību.

# Parbaude

Kad jūsu telefona zvana detektors ir pievienots Jenile uztvērējiem, jums jāpārbauda, vai tas darbojas ar tālruni.


Jums ir 2 pārbaudes iespējas.

## 1. Lietošana vibrācijas režīmā:

- 1 Novietojiet mobilo tālruni vibrācijas režīmā.
- 2 Pēc tam novietojiet to uz sava mobilā telefona zvana detektora
- 3 Lieciet savam tālrunim vibrēt: vajadzētu iedegties jūsu indikatoram mobilā telefona zvana detektorā un visiem Jenile uztvērējiem.

## 2. Izmantojiet skaņas režīmā :

- 1 Ieslēdiet mobilo tālruni zvana režīmā.
- 2 Pievienojiet kontaktligzdu (J) tālruņa audio kabelim, bet otru galu (J) - zvana detektora audio ligzdā (C).

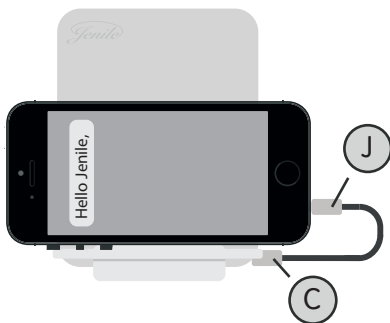

- 3 Zvanot uz tālruni: vajadzētu iedegties indikatoram mobilā telefona zvana detektorā un uz visiem Jenile uztvērējiem.

Ja lietošana vibrācijas režīmā (izmantojiet Nr.1) nedarbojas un saņemot īsziņu vai zvanu, jūsu mobilā telefona zvana detektors nedeg : jūsu vibrators nav pietiekami jaudīgs. Šajā gadījumā neuztraucieties, varat izmantot skaņas režīmu (izmantojiet Nr.2), lai nodrošinātu 100% rezultātu.



[www.jenile.com](http://www.jenile.com)

